



# ワクチン接種する?しない?

## 中和抗体チェックで”本物の安心感”を。

### 新型コロナウイルス ワクチン接種前後の 中和抗体<sup>※1</sup>の確認に<sup>※2</sup>

[Neutralizing Antibody]

研究用  
検査1回分

### 抗体検査 | 2019-nCoV RBD Antibody Rapid Test

テストプレートに血液検体を滴下後、15分程度で検査結果を確認出来ます。<sup>※2</sup>

※1 ワクチンを接種していなくても、「中和抗体」を保有していることがあります。

※2 検出対象物の量、検査実施環境によっては検出できない可能性があります。

BORDER ZERO

こんな方の中和抗体を検出

### 無症状?

実はもっているかもしれない?  
中和抗体を確認したい方に。



### ワクチン後

ワクチン接種後の中和抗体の  
再確認のために。



### 感染後

中和抗体を持っているか心配  
な方の確認のために。



新型コロナウイルス中和抗体の有無を検出するキットです。


研究用 検査1回分

## 新登場



### CHECK! 中和抗体のココがスゴイ!

抗体とは、体内に入ったモノに結合して攻撃したり無害化したりする、体の免疫機能を担う物質のひとつです。抗体は種類によって様々な機能があり、機能のよくわかっていないものがあつたり、中には花粉症の原因になったりするものもあるようです。しかし、この抗体の中で、ウイルスに結合して、**ウイルスが人の細胞へ侵入しないよう防ぐ抗体は、中和抗体と呼ばれています。**

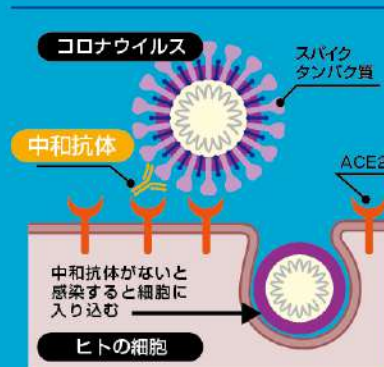

### 中和抗体の仕組み

コロナウイルスがヒトの細胞に感染する際、ウイルスは先端にあるスパイク部をヒトの細胞と結合させようとします。中和抗体は、身代わりとなってスパイク部に結合し、細胞を感染から守ります。この中和抗体が検体内にあるかを検出しています。

### その他の抗体検査との違いは?

市販されている抗体検査キットの多くは、一般的に抗体について検出するものですが、弊社商品は、ウイルスの感染能力を失わせる\*「中和抗体」に特化して検出するものです。様々な状況の中で中和抗体を持っているかどうかの確認が出来ます。

\*「中和抗体」を持っていたとしても抗体量や体調等により、ウイルスに感染する可能性はあります。

品名：新型コロナウイルス抗体検査キット  
SARS-CoV-2 RBD ANTIBODY

■キット内容  
テストプレート×1・検体採取キット×1  
専用検体希釈液×1・説明書

■使用期限：製造から1年  
■生産国：日本製

<型番> BZ-ART-TK02  
<JAN> 4562441908919

【使用目的】●本製品は、検体内に新型コロナウイルスの感染能力を失わせる中和抗体が存在するか、検査するものです。●本抗体検査は抗原の有無(新型コロナウイルスが存在するかどうか)や、現在自分が感染しているかどうかを調べる検査ではありません。個々の今後の対策の指標となるものです。●検査結果は体調や病歴などによって左右される場合がございます。●抗原検査とは異なります。【使用上の注意】●ご使用の際は添付の説明書をよくお読みいただき、ご使用される方ご自身の責任において、正しくご使用ください。●本キットは、研究用製品となります。また、本製品は抗体の有無を調べる検査であり、新型コロナウイルス感染症への感染の有無の診断とは無関係なので、医薬品医療機器等法に基づく体外診断用医薬品ではありません。●本製品は、研究や調査を目的としたもので本検査以外の目的に使用することはできません。●本製品を用いた検査は、診断や治療を目的とすることができません。●採血を伴う為、血液凝固能力を下げる薬剤を服用中の方や血が止まりにくい体質の方、不安障害や不安症状などを日常から感じやすい方は使用をお控えください。●本製品の外观・仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

・・・お申し込みは・・・ (販売価格：3,080円 税込)  
(株)ダイワグループ 新型コロナウイルス抗体検査キット係 (法人営業部)  
Tel: 03-5377-1381 Fax: 03-3314-6094 月～金 10:00～17:00  
〒166-0003 東京都杉並区高円寺南4-27-17 恒陽サンクレスト高円寺ビル903  
e-mail: info@kokusairyoko.com  
販売元：株式会社東亜産業 製造元：東亜製薬株式会社

\*FAX専用ご注文書はこちらより